

ЛЕЧЕБНО ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Имя Профессионалов в дезинфекции



Предисловие

Бертран и Тьерри ЛЕТАРТ



// В лечебном учреждении не может быть никаких компромиссов, когда речь идет о борьбе с нозокомиальными инфекциями. Все усилия научных исследований и разработок Лабораторий АНИОС направлены именно на это. Качество и эффективность нашей продукции, постоянное развитие наших инноваций являются тому подтверждением. В этом - наша главная сила. Продукция, которую мы с гордостью представляем Вам в этом каталоге, является высокоэффективной в своей области, при этом оставаясь безопасной при использовании.

Наконец, всегда ставя осознанно на первое место насущные вопросы, связанные с безопасностью окружающей среды, мы предвосхитили нормативы и регламенты, подобные регламентам REACH и директиве Biocides. Результат наших инвестиций увенчался многими сертификатами и обязательством ANIOSAFE - бескомпромиссным в вопросах эффективности препарата и безопасности для Человека и Окружающей среды, на протяжении его существования - от создания формулы вплоть до его использования.

Благодарим за Ваше доверие и хотим заверить, что делаем все возможное, чтобы его заслужить, поэтому остаемся // постоянно в Вашем распоряжении.

Продукция и сервис КАЧЕСТВА



→ Новый исследовательский центр:

- включает **Химическую лабораторию** для разработки формул,
- Химико-аналитическую лабораторию**, аккредитованные BPL и
- Микробиологическую лабораторию**, аккредитованную COFRAC.
- создание инновационных формул.
- оценка микробиологической эффективности.
- оценка совместимости формул с материалами внутрибольничной среды.

→ Дополнительные услуги:

- к Вашим услугам - **центр для занятий**, оборудованный учебно-методическими пособиями (тренинги, протоколы использования, видео...).
- **конструкторский центр** по разработке и производству оборудования, предназначенного для оптимизации эффективности наших препаратов.



*REACH: Регистрация, Оценка и Одобрение Химических веществ
**Biocides: Директива о биоцидах- Директива Европейского парламента и Европейского Совета 98/8/ЕС от 16 февраля 1998 г.

Вы найдете нас на www.anios.ru

Наше обязательство: Ваша **БЕЗОПАСНОСТЬ**

→ Удобство в использовании

- Специальные упаковки: адаптированные и упрощённые системы дозирования для контроля расхода. А также автоматические системы дозирования и подачи продукта.

→ Упрощенная визуальная идентификация

- Единый этикетаж: для каждого применения свой цвет и своя картинка.



Наше желание: уважать **ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ**

→ Сертификация ISO 14001, OHSAS 18001

Качество и эффективность нашей продукции, безопасность персонала и окружающей среды являются частью нашей политики. Эта сертификация получена в марте 2009 и к Вашим услугам - продукция, разработанная и изготовленная на основе наших ценностей.

→ Экологическая гамма для:

- уменьшения воздействия на водообитающие организмы
- ограничения использования опасных субстанций



→ Процесс высокой степени безопасного для окружающей среды производства.

Обработка всех сливных вод путём испарения на каждом заводе перед сливом в канализационную систему с целью получения воды более высокого качества, чем французские государственные нормативы.

→ Корпоративные обязательства по ANIOSAFE:

- На всех этапах - от производства до упаковки, сделать все нужное, чтобы наш процесс производства имел наименьшее воздействие на окружающую среду (см. нашу закладку на стр. 4)





* ANIOSAFE: Наше добровольное обязательство по Эко-концепции

Уже нескольких лет, как Лаборатории АНИОС взяли на себя добровольные обязательства по трем основным ценностям своей системы менеджмента:

Качество, Безопасность и Окружающая среда

Для более четкой картины мы разработали корпоративный устав ANIOSAFE, который, превосходя обязательные регламенты и нормативы, подтверждает нашу приверженность борьбе с микробами при соблюдении безопасности Человека и Окружающей среды.

На всех этапах существования препаратов АНИОС, устав ANIOSAFE обязывает нас принимать во внимание эко-концепцию, то есть защиту окружающей среды при производстве нашей продукции. В том числе уставом предусмотрены меры по контролю воздействий на человека.

* АНИОСЕЙФ

Наша ЭКО-КОНЦЕПЦИЯ



ТРАНСПОРТ

Устав ANIOSAFE гарантирует:

- Приоритетное производство препаратов в концентрированном виде, что позволит сократить использование транспорта.
- Выбор транспортных компаний, соответствующих стандарту ЕВРО 4 и подготавливающимися к стандарту ЕВРО 5 (вступает в силу в 2010 году).
- Использование транспортных средств с низким выбросом CO₂.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Лаборатории АНИОС разработали ряд вспомогательных материалов для своей продукции, включённой в устав ANIOSAFE.

- Предоставление полной научно-технической документации, детализирующей все свойства формулы.
- Обучение на месте пользователей методике максимально эффективного и правильного использования продукции.
- Текущие тренинги по продукции для специалистов по продажам для получения методологических и научных знаний.



УПАКОВКА

Качество упаковки и ее материала приобретает особое значение под конец жизненного цикла препарата, поэтому также включено в устав ANIOSAFE:

- Предпочтение отдаётся упаковкам, которые можно подвергать переработке
- Отказ от аэрозольных баллонов в пользу других систем распыления.
- Разработка фасовок из моно-материала, благоприятствующего их повторной переработке.
- Исследования и разработка новых решений по биodeградируемой упаковке.



Этот логотип гарантирует соответствие препарата всем параметрам нашего обязательства



СЫРЬЕ И СОСТАВ: ЭКО-СОСТАВ

Эко-формулы ANIOSAFE охватывают экологические аспекты выбора сырья и разработки составов наших препаратов:

- Превращение регламентных ограничений в благоприятную возможность для инноваций (BIOCIDES и REACH).
- Развитие партнерских отношений (с поставщиками и научно-исследовательскими лабораториями) для разработки новых поколений активных субстанций и добавок.
- Устранение CMR-субстанций (канцерогенных, мутагенных и репротоксичных).
- Замена, по возможности, аллергенных субстанций и летучих органических соединений (VOC).
- Предпочтительное использование биodeградируемых и не биоаккумулируемых молекул.
- Использование субстанций растительного происхождения (олеохимия): новые поколения ПАВ.



ПРОИЗВОДСТВО: ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЗАВОДА С 3 СЕРТИФИКАТАМИ



Сертифицированные ISO 9001 с 2001 года, затем - ISO 14001 и OHSAS 18001, Лаборатории АНИОС соответствуют всем требованиям подготовки, реализации, совершенствования и оценки Системы Менеджмента Качества, Окружающей среды и Безопасности.

Относительно производства и хранения нашей продукции уставом ANIOSAFE подразумевается:

- Система обработки и фильтрации сточных вод, связанная с каждым объектом производства
- Повторное применение воды, использованной в производственном цикле
- Оптимизация использования воды для промывки
- Очистка сточных вод до уровня более высокого, чем требования французских государственных нормативов.
- Бассейны под складами на случай утечки препаратов или химических субстанций
- Создание систем сбора и сортировки отходов всех служб предприятия (лаборатории, производство, упаковочная)
- Внедрение новаторского принципа печати этикеток и документов он-лайн, для рационального производства этикеток.

ЕЖЕДНЕВНО В НАШИХ ОФИСАХ ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ НАШИХ СОТРУДНИКОВ:

- Отдаем предпочтение типографиям «Imprim'vert» для наших коммерческих документов.
- Оптимизация потребления бумаги
- Сортировка офисных отходов
- Детские ясли: экологические и биоклиматические

ДИРЕКТИВА О БИОЦИДАХ (BPD)

Директива 98/8/СЕ от 16 февраля 1998

Определение

Биоцидные продукты, направленные на уничтожение, обезвреживание и устранение вредных организмов, для предупреждения их воздействий или для борьбы с ними любыми другими способами путём химического или биологического воздействия. Сюда относятся как активные субстанции, так и препараты, содержащие одну или несколько активных субстанций.

Цель

Директива о биоцидах является европейской инициативой, для контроля за эффективностью биоцидных продуктов, с учётом здоровья людей, животных и безопасности окружающей среды. Эта директива даст разрешение на маркетинг биоцидных продуктов на уровне национальных рынков после проведения оценки их опасности, рисков их использования и их эффективности.

Разрешение будет выдано после одобрения активных веществ биоцидов на уровне ЕС после их оценки в плане опасностей, рисков и эффективности (перечень в приложении I Директивы).

Внедрение

Десятилетний период, отведенный для анализа всех веществ, оказался недостаточно, поэтому он продлен еще на 4 года, дата окончания - 14 мая 2014.

Новая дата не отменяет обязательств, которые уже установлены, особенно это касается состава (использование биоцидных активных веществ, в настоящее время находится на стадии исследования) и этикетирования.

Дезинфицирующие биоцидные препараты находятся в процессе исследования и первые заключения в приложении I ожидаются в конце 2010 - начале 2011.

Заявки на регистрационные удостоверения для продажи дезинфицирующих продуктов должны быть поданы в течение двух лет, то есть - до 2012/2013 годов.

Полный текст Директивы, а также как и подробную информацию по её исполнению, Вы найдете, по следующим ссылкам:

На Европейском уровне:

ec.europa.eu/environment/biocides/index.htm

На Французском уровне:

www.ecologie.gouv.fr/-Produits-biocides-.html

4 группы биоцидных продуктов

• **Группа 1:** Дезинфектанты и общие биоцидные продукты.

Эта группа включает 5 ТП (типов продукции):

- **ТП 1:** Биоцидные продукты, предназначенные для гигиенических целей человека.

Не относятся:

- антисептические препараты для повреждённой кожи или кожи, перед инвазивными процедурами (соответствуют требованиям директивы, регулирующей фармацевтические средства)

- косметические продукты: продукты гигиены тела и ухода за кожей (относится к директиве о косметических средствах).

- **ТП 2:** Дезинфицирующие средства, используемые в частных, общественных и промышленных помещениях, включая медицинские учреждения.

Не относятся:

Продукты, которые специально предназначены для дезинфекции приборов медицинского назначения. Это относится к директиве, регулирующей приборы медицинского назначения.

- **ТП 3:** Биоцидные продукты, предназначенные для гигиены в ветеринарии.

- **ТП 4:** Дезинфицирующие средства для поверхностей, контактирующих с продуктами питания и кормами для животных.

- **ТП 5:** Дезинфицирующие средства для питьевой воды.

• **Группа 2:** Консерванты: защита дерева, консерванты для детергентов...(ТП 6-13).

• **Группа 3:** антипаразитарные продукты: репелленты, инсектициды...(ТП 14-19).

• **Группа 4:** Другие биоцидные продукты : защита продуктов питания, бальзамирование...(ТП 20-23).

Касается ли эта директива меня, как пользователя?

Помимо обязательств, наложенных на производителей биоцидных субстанций и на разработчиков рецептур, использующих эти субстанции, директива о биоцидах включает обязательства для пользователей вышеуказанных биоцидных продуктов.

Сегодня

Возможно использование дезинфицирующих биоцидных продуктов, в состав которых входят только разрешённые активные вещества, подвергаемые в настоящее время оценке, для возможного адекватного их использования. Это может контролироваться пользователем, в том числе - Региональным Управлением по Делах Промышленности, Науки и Защиты Окружающей Среды.

Завтра

В конце переходного периода, потребитель должен будет использовать только продукты, имеющие регистрационное разрешение АММ (Autorisation de Mise sur le Marche) на торговлю.

Пользователь должен будет удостовериться в том, что все инструкции по применению и условия использования (разведение - контактное время - температура), указанные в предварительно утверждённых протоколах, соответствуют условиям в регистрационном удостоверении продукта.

Любое применение биоцидных продуктов должно осуществляться в строгом соответствии с условиями АММ.

СОДЕРЖАНИЕ

ОБРАБОТКА ПОЛОВ И ПОВЕРХНОСТЕЙ 8-11

- Концентрированные детергенты ■
- Концентрированные детергенты-дезинфектанты ■
- Готовый к применению детергент-дезинфектант ■
- Быстрая дезинфекция ■

ОБРАБОТКА ИНСТРУМЕНТОВ И ЭНДСКОПОВ 12-18

- Дезинфекция и ПСО ИМН ■
- Энзимная очистка и дезинфекция ИМН ■
- ДВУ/Холодная стерилизация ■
- Эндоскопическое оборудование

МАШИННАЯ ОБРАБОТКА ИНСТРУМЕНТОВ И ЭНДСКОПОВ 19-20

- Машинная обработка инструментов ■ ■
- Машинная обработка эндоскопов ■

ГИГИЕНА РУК И КОЖНЫЕ АНТИСЕПТИКИ 21-29

- Мягкое и антисептическое мыла ■ ■
- Антисептический гель ■
- Кожные антисептики ■
- Оборудование

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ 30-32

- Гамма экологическая линия ■
- Детергент дезинфектант для посуды ■
- Автоматическая мойка подкладных суден ■



Для каждого применения.
свой цвет...



Наш новый графический принцип имеет **единственную цель** –
предоставить Вам возможность чёткой и простой идентификации
препаратов и облегчить их использование:
Облегчаем вам жизнь!



ОБРАБОТКА ПОЛОВ И ПОВЕРХНОСТЕЙ

→ Наши решения для биоочистки

Важно всегда комбинировать микробиологическую и визуальную очистку. Лаборатории АНИОС предлагают вам гамму **“детергентов”** и **“детергентов-дезинфектантов”** для чередования. Синергизм используемых ПАВ-ов не только гарантирует оптимальную очистку, но также оптимизирует процесс дезинфекции.

Концентрированные детергенты

ДЕТЕРГ'АНИОС СУРАКТИФ МАРИН09
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ДОЗИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ09

Концентрированные детергенты-дезинфектанты

СУРФАНИОС ПЛЮС10
АНИОСУРФ ФРЕШЕР10

Готовый к применению детергент-дезинфектант

СУРФА'СЕЙФ 11

Быстрая дезинфекция

СПРЕЙ СЗ.2911

ДЕТЕРГ'АНИОС СУРАКТИФ МАРИН

Концентрированное средство для мытья поверхностей.



- Детергент с эффектом нейтрализации неприятных запахов

ПРИМЕНЕНИЕ: Для ежедневной очистки любых моющихся поверхностей: полов (кафель, пластик...), стен (кафель, пластик, вододисперсионные краски), сантехники, пластиковых, стеклянных и других поверхностей.

СОСТАВ: Неионогенные и амфотерные ПАВ-ы, хелатные соединения, и другие добавки.

СВОЙСТВА: Формула с нейтральным pH. Полная совместимость с материалами. Высокая степень очистки согласно DСР. Нейтрализует неприятные запахи.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Рекомендованная концентрация рабочего раствора: 0,1% - 0,25% (8 - 20мл → 8 л воды). Не смывать.

УПАКОВКА:
500 саше по 20 мл
4 пластиковые канистры по 5 л с дозирующей помпой



Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по использованию препарата.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ ДОЗИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ

ПРОСИСТЕМ КОМПАКТ & ПЛОНЖ ПРОДОЗ



Системы автоматической дозировки моющих растворов: ДЕТЕРГ'АНИОС СУРАКТИФ МАРИН, СУРФАНИОС ПЛЮС...

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Дозировка системой VENTURI с колибровонной насадкой
- Коробка из ПВХ (толщина 5 мм)
- Сопротивление: максимум 8 бар
- Возможность подсоединения к холодной или горячей воде (+55°C максимум)
- Держатель для 5-литровой канистры из нержавеющей стали

ПРОСИСТЕМ КОМПАКТ

- Размеры: 480 В x 340 Д x 80 Г (мм)
- Ударостойкий пистолет-распылитель, снабжённый системой для быстрого соединения

ПЛОНЖ ПРОДОЗ

- Размеры: 370 В x 120 Д x 110 Г (мм)
- Свободный поток: 13 л
- Динамическое давление: 2,5 бар

ВИДЫ ДОЗИРУЮЩИХ СИСТЕМ:

ПРОСИСТЕМ КОМПАКТ на 1 продукт
ПРОСИСТЕМ КОМПАКТ на 2 продукта
ПЛОНЖ ПРОДОЗ

СУРФАНИОС ПЛЮС

Концентрированное моющее и дезинфицирующее средство для поверхностей.

- Эффективно против плесени
- Активно против H_1N_1 и H_5N_1
- Не содержит альдегидов



ПРИМЕНЕНИЕ: Очистка и дезинфекция полов, стен, оборудования и других поверхностей без последующего смывания.

СОСТАВ: ЧАС, третичный амин, ПАВ, и другие добавки.

АНТИМИКРОБНЫЕ СВОЙСТВА: Средство активно в отношении: БАКТЕРИЙ (в том числе - микобактерий туберкулеза, возбудителей особо опасных инфекций), ВИРУСОВ (в том числе - возбудителей парентеральных гепатитов, ВИЧ, полиомиелита, герпеса, респираторных и энтеровирусных инфекций, свиного ($A H_1N_1$) и птичьего (H_5N_1) гриппа), ГРИБОВ (в том числе - родов Кандида, Дерматофитон, плесневых грибов).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Рекомендованная концентрация рабочего раствора: 0,25% (20мл → 8 л воды). Не смывать.

УПАКОВКА:

12 пластиковых флаконов по 1 л с дозатором
4 пластиковые канистры по 5 л с дозирующей помпой



АНИОСУРФ ФРЕШЕР

Концентрированное моющее и дезинфицирующее средство для поверхностей.

- Активно против H_1N_1 и H_5N_1
- Не содержит альдегидов



ПРИМЕНЕНИЕ: Очистка и дезинфекция полов, стен, оборудования и других поверхностей без последующего смывания.


СОСТАВ: ЧАС, гуанидин, ПАВ, и другие добавки.

АНТИМИКРОБНЫЕ СВОЙСТВА: Средство активно в отношении: БАКТЕРИЙ (в том числе - микобактерий туберкулеза, возбудителей особо опасных инфекций), ВИРУСОВ (в том числе - вирусов парентеральных гепатитов, ВИЧ, полиомиелита, свиного ($A H_1N_1$) и птичьего (H_5N_1) гриппа), ГРИБОВ (в том числе - плесневых, родов Кандида и Дерматофитон).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Рекомендованная концентрация рабочего раствора: 0,25% - 0,5% (20 - 40мл → 8 л воды). Не смывать.

УПАКОВКА:

500 саше по 20 мл
12 пластиковых флаконов по 1 л с дозатором
4 пластиковые канистры по 5 л с дозирующей помпой

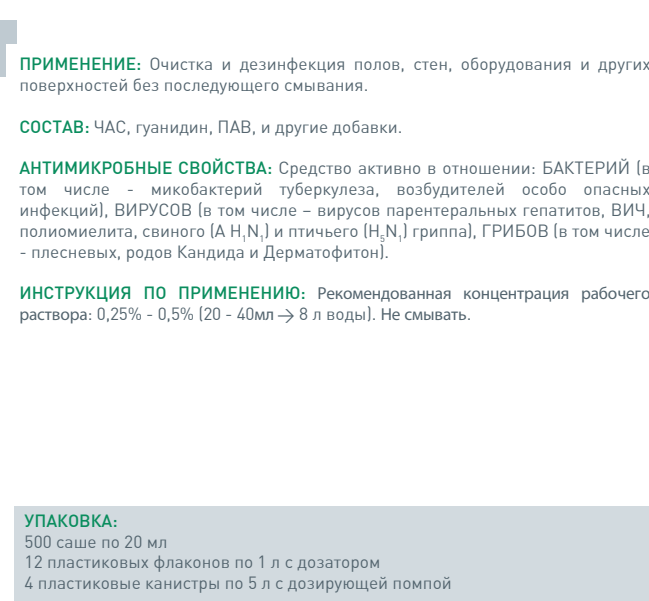



СУРФА'СЕЙФ

Пена для очистки и дезинфекции малых поверхностей.

НОВИНКА



БЕЗОПАСНОСТЬ

- Детергент-дезинфектант, не содержит мутагенных, канцерогенных, репротоксичных субстанций (CMR).
- Без отдушки и спирта.
- Пеногенератор препятствует образованию аэрозолей средства в воздухе при его нанесении.
- Состав препарата оптимально совместим с различными материалами, в частности – на базе полимеров (напр.: плексиглас, из которого состоит корпус кувеза).

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Широкий антимикробный спектр.
- Пена улучшает контакт средства с обрабатываемой поверхностью и предупреждает стекание средства.
- Широкий спектр применения средства, в том числе, куветы и поверхности, контактирующие с продуктами питания.

ПРОСТОТА

- Средство готово к использованию.
- Эргономичная форма упаковки и её вес (750 мл) облегчают работу персонала с препаратом.
- Формула обеспечивает быстрое высыхание обработанной поверхности.



ПРИМЕНЕНИЕ: Очищающая и дезинфицирующая пена для малых поверхностей: куветы, операционные столы, лампы, смотровые столы, различное медицинское оборудование (ЖК-экраны, УЗИ-датчики...), рабочие и лабораторные поверхности.

СОСТАВ: ЧАС, гуанидин, ПАВ и другие добавки.

АНТИМИКРОБНЫЕ СВОЙСТВА: Средство активно в отношении: БАКТЕРИЙ (в том числе – микобактерий туберкулёза), ВИРУСОВ (в том числе – вирусов парентеральных гепатитов, ВИЧ, свиного (A H₁N₁) и птичьего (H₅N₁) гриппа), ГРИБОВ (в том числе – родов Кандида и Трихофитон).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Готовое к применению средство. Нанести пену на несколько точек поверхности (6,5мл на 1м²) или на тряпку, не оставляющую ворса, протереть, дать высохнуть. Не смывать.

Промывка куветов после дезинфекции может осуществляться водой, полученной с помощью 0,2 мк фильтров FILTRANIOS (стр.26).



УПАКОВКА:

12 флаконов по 750 мл с пенораспылителем

СПРЕЙ С3.29

Спрей для быстрой дезинфекции поверхностей.

- Не содержит альдегидов
- Быстро высыхает, не оставляя следов



ПРИМЕНЕНИЕ: Быстрая дезинфекция поверхностей, медицинского оборудования, мебели и др. (в операционных, в отделениях повышенного риска, смотровых кабинетах...) способом орошения.


СОСТАВ: ЧАС, гуанидин, пропиловый спирт и другие добавки.

АНТИМИКРОБНЫЕ СВОЙСТВА: Средство активно в отношении: БАКТЕРИЙ (в том числе – микобактерий туберкулёза), ВИРУСОВ (в том числе – возбудителей парентеральных гепатитов, ВИЧ, герпеса, полиомиелита, свиного (A H₁N₁) и птичьего (H₅N₁) гриппа), ГРИБОВ (в том числе – родов Кандида, Трихофитон).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Готовое к использованию средство. Нанести на поверхность с помощью ручного распылителя или аппарата для орошения. Дать высохнуть. Не смывать.

УПАКОВКА:

12 пластиковых флаконов по 1 л с распылителем
4 пластиковые канистры по 5 л

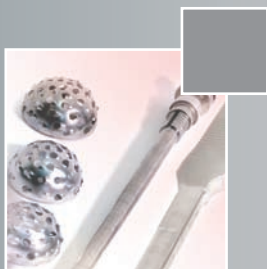

ОБРАБОТКА ИНСТРУМЕНТОВ И ЭНДСКОПОВ

→ Полное и эффективное решение

ЗАГРЯЗНЕННЫЕ ИМН


Очистка



ДВУ/Стерилизация



Окончательная промывка

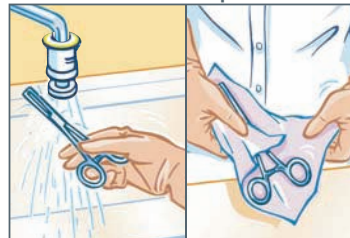

Дезинфекция и ПСО ИМН

ГЕКСАНИОС Г+Р13
САЛЬВАНИОС pH713

Энзимная очистка и дезинфекция ИМН

АНИОЗИМ N214
АНИОЗИМ DD114

ДВУ/Холодная стерилизация

СТЕРАНИОС 2% 15
СТЕРАНИОС 20%
КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ15
АНИОКСИД 100016
АНИОСЕПТ АКТИВ17

Эндоскопическое оборудование

ЭНДСКОПИЧЕСКИЙ ШКАФ18
МОДУЛЬ ЭНДСКОПИЧЕСКИЙ18

Окончательная промывка ИМН, а также эндоскопов после ДВУ осуществляется фильтрованной водой, полученной с помощью фильтров FILTRANIOS (стр.26).



ГЕКСАНИОС Г+Р

Концентрированное средство для очистки, совмещённой с дезинфекцией, ИМН.

- Нейтральный pH
- Совместим с любыми металлами, стеклом и пластиками



ПРИМЕНЕНИЕ: Очистка, в том числе совмещённая с дезинфекцией, ИМН: инструментов (хирургических, стоматологических, термолабильных...), гибких и жёстких эндоскопов. Ультразвуковая очистка.

СОСТАВ: ЧАС, гуанидин, ПАВ и другие добавки.

АНТИМИКРОБНЫЕ СВОЙСТВА: Средство активно в отношении: БАКТЕРИЙ (в том числе - микобактерий туберкулеза), ВИРУСОВ (в том числе - возбудителей парентеральных гепатитов, ВИЧ, полиомиелита, свиного (А H₅N₁) и птичьего (H₅N₁) гриппа), ГРИБОВ (в том числе - родов Кандида, Трихофитон).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Рекомендованная концентрация рабочего раствора: 0,1% - 0,5% (5-25мл → 5 л воды). Ополаскивать водой по окончании обработки средством.

УПАКОВКА:

200 саше по 25 мл
12 пластиковых флаконов по 1 л с дозатором
4 пластиковые канистры по 5 л с дозирующей помпой

САЛЬВАНИОС pH7

Концентрированное средство для очистки, совмещённой с дезинфекцией, ИМН.

- Нейтральный pH
- Совместим с любыми металлами, стеклом и пластиками



ПРИМЕНЕНИЕ: Очистка, в том числе совмещённая с дезинфекцией, ИМН: инструментов (хирургических, стоматологических, термолабильных...), гибких и жёстких эндоскопов. Ультразвуковая очистка.

СОСТАВ: ЧАС, гуанидин, ПАВ и другие добавки.

АНТИМИКРОБНЫЕ СВОЙСТВА: Средство активно в отношении: БАКТЕРИЙ (в том числе - микобактерий туберкулеза), ВИРУСОВ (в том числе - возбудителей парентеральных гепатитов, ВИЧ, полиомиелита, свиного (А H₅N₁) и птичьего (H₅N₁) гриппа), ГРИБОВ (в том числе - родов Кандида, Трихофитон).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Рекомендованная концентрация рабочего раствора: 0,1% - 0,5% (5-25мл → 5 л воды). Ополаскивать водой по окончании обработки средством.

УПАКОВКА:

200 саше по 25 мл
12 пластиковых флаконов по 1 л с дозатором
4 пластиковые канистры по 5 л с дозирующей помпой


Аниозим DD1 - Аниозим N2

Два препарата с доказанной эффективностью для оптимизации очистки и дезинфекции

АНИОЗИМ DD1 и АНИОЗИМ N2 гарантируют **очистку высокого уровня и оптимальную безопасность**.
АНИОЗИМ DD1 и АНИОЗИМ N2 являются эталоном для **стандартизации** очищающих свойств.

5 СВОЙСТВ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Трёхэнзимная очистка высокого уровня
 - Контроль коррозии
 - Безопасность окружающей среды
 - Безопасность и простота использования
 - Антимикробная эффективность
- АНИОЗИМ DD1:** очистка с широким дезинфицирующим спектром.
АНИОЗИМ N2: детергент с бактериостатическими и фунгистатическими свойствами рабочего раствора

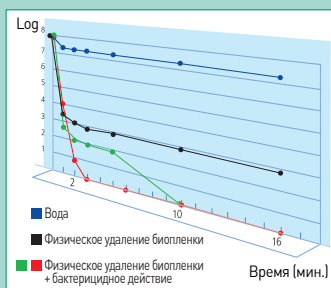


Кинетика удаления

Трёхэнзимная активность доказана!

Человеческий
альбумин
+
Аниозим DD1

- Через 15 мин
- Через 4 часа
- Через 8 часов

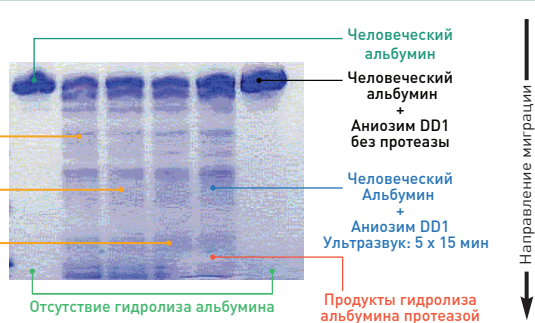

Протеолитическая активность Аниозима DD1 в отношении человеческого альбумина (Электрофорез в геле)

- Также доказана активность **амилазы и липазы**

АНИОЗИМ N2

Концентрированное трёхэнзимное средство для очистки ИМН.

- Нейтральный pH
- Трёхэнзимная очистка высокого уровня



ПРИМЕНЕНИЕ: Очистка высокого уровня ИМН: инструментов (хирургических, стоматологических, термолабильных...), гибких и жёстких эндоскопов. Ультразвуковая очистка.

СОСТАВ: Ферментный комплекс (липаза, альфа-амилаза, протеаза), ПАВ и другие добавки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Рекомендованная концентрация рабочего раствора: 0,4% - 0,5% (20-25мл → 5 л воды). Ополаскивать водой по окончании обработки средством.

УПАКОВКА:

12 пластиковых флаконов по 1 л с дозатором
4 пластиковые канистры по 5 л с дозирующей помпой

АНИОЗИМ DD1

Концентрированное трёхэнзимное средство для очистки, совмещённой с дезинфекцией, ИМН.

- pH нейтральный
- Единственное энзимное средство с дезинфицирующими свойствами



ПРИМЕНЕНИЕ: Очистка высокого уровня, в том числе совмещённая с дезинфекцией, ИМН: инструментов (хирургических, стоматологических, термолабильных...), гибких и жёстких эндоскопов. Ультразвуковая очистка.

СОСТАВ: ЧАС, гуанидин, ферментный комплекс (липаза, альфа-амилаза, протеаза), ПАВ и другие добавки.

АНТИМИКРОБНЫЕ СВОЙСТВА: Средство активно в отношении: БАКТЕРИЙ (в том числе - микобактерий туберкулеза), ВИРУСОВ (в том числе - возбудителей парентеральных гепатитов, ВИЧ, герпеса, полиомиелита, свиного (A H₁N₁) и птичьего (H₅N₁) гриппа), ГРИБОВ (в том числе - родов Кандида, Трихофитон).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Рекомендованная концентрация рабочего раствора: 0,25% - 0,5% (12,5-25мл → 5 л воды). Ополаскивать водой по окончании обработки средством.

УПАКОВКА:

200 саше по 25 мл
12 пластиковых флаконов по 1 л с дозатором
4 пластиковые канистры по 5 л с дозирующей помпой

СТЕРАНИОС 2%

Готовый к применению раствор глутарового альдегида для ДВУ и стерилизации.

- ДВУ – 5 минут / Стерилизация – 1 час
- Стабильность рабочего раствора 30 дней

Окончательная промывка ИМН, а также эндоскопов после ДВУ осуществляется фильтрованной водой, полученной с помощью фильтров FILTRANIOS (стр.26).



ПРИМЕНЕНИЕ: ДВУ/холодная стерилизация ИМН: инструментов (хирургических, стоматологических, термолabileных...), гибких и жёстких эндоскопов ручным способом и в автоматических машинах.

СОСТАВ: Раствор глутарового альдегида (2%), другие добавки.

АНТИМИКРОБНЫЕ СВОЙСТВА: Средство активно в отношении: БАКТЕРИЙ (в том числе - микобактерий туберкулеза), ВИРУСОВ (в том числе - возбудителей парентеральных гепатитов, ВИЧ, полиомиелита), ГРИБОВ (в том числе - родов Кандида, Трихофитон), СПОР.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Готовый к применению препарат. Контактное время: ДВУ - 5 минут, стерилизация - 1 час.



Контролировать рабочий раствор с помощью индикаторных тест-полосок.

УПАКОВКА:

1 пластиковая канистра по 2 л
4 пластиковые канистры по 5 л
100 полуколичественных индикаторных тест-полосок в пластиковом пенале

СТЕРАНИОС 20% КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ

Концентрированный раствор глутарового альдегида для ДВУ и стерилизации.

- Стабильность рабочего раствора 30 дней



Контролировать рабочий раствор с помощью индикаторных тест-полосок.



ПРИМЕНЕНИЕ: ДВУ/холодная стерилизация ИМН: инструментов (хирургических, стоматологических, термолabileных...), гибких и жёстких эндоскопов ручным способом и в автоматических машинах.

СОСТАВ: Концентрированный раствор глутарового альдегида (20%), другие добавки.

АНТИМИКРОБНЫЕ СВОЙСТВА: Средство активно в отношении: БАКТЕРИЙ (в том числе - микобактерий туберкулеза), ВИРУСОВ (в том числе - возбудителей парентеральных гепатитов, ВИЧ, полиомиелита), ГРИБОВ (в том числе - родов Кандида, Трихофитон), СПОР.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 10% рабочий раствор по препарату и 2% - по ДВ (1 флакон по 250 мл → 2,5 л рабочего раствора; 1 флакон по 500 мл → 5 л; 1 канистра по 5 л → 50 л). Контактное время: ДВУ - 5 минут, стерилизация - 6 часов.

УПАКОВКА:

20 пластиковых флаконов по 250 мл
20 пластиковых флаконов по 500 мл
2 пластиковые канистры по 5 л
100 полуколичественных индикаторных тест-полосок в пластиковом пенале

АНИОКСИД 1000

Активированный раствор надуксусной кислоты для ДВУ и стерилизации.

АНАЛОГОВ НЕТ



- Запатентованный препарат
- Первый стерилант системы PHERA®
- Альтернатива глутаровому альдегиду
- Не содержит уксусной кислоты
- pH нейтральный
- Спороцидная активность: 30 минут

Настаивайте только на
полной безопасности



Окончательная промывка ИМН, а также эндоскопов после ДВУ осуществляется фильтрованной водой, полученной с помощью фильтров FILTRANIOS (стр.26).



Контролировать рабочий раствор с помощью индикаторных тест-полосок.

ПРИМЕНЕНИЕ: ДВУ/холодная стерилизация ИМН: инструментов (хирургических, стоматологических, термолabileльных...), гибких и жестких эндоскопов ручным способом и в автоматических машинах.

СОСТАВ: Экстемпорально активированный раствор надуксусной кислоты, полученный из ацетилкапролактама (система PHERA®). Базовый раствор содержит 3% перекись водорода.

АНТИМИКРОБНЫЕ СВОЙСТВА: Средство активно в отношении: БАКТЕРИЙ (в том числе - микобактерий туберкулеза), ВИРУСОВ (в том числе - возбудителей парентеральных гепатитов, ВИЧ, полиомиелита), ГРИБОВ (в том числе - родов Кандида, Трихофитон), СПОР.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: После активации раствор готов к применению. Контактное время: ДВУ - 5 минут, стерилизация - 30 минут.

УПАКОВКА:

4 пластиковые канистры по 5 л (базовый раствор)
+ 4 интегрированных активатора
50 полуколичественных индикаторных тест-полосок в пластиковом пенале



ПРАКТИЧНО
Флакон активатора
интегрирован с канистрой

ИННОВАЦИОННЫЙ

АНИОКСИД 1000 – это инновационный препарат, прямой продукт системы PHERA® (экстемпоральный пергидролиз ацетилрадикалов).

БЕЗОПАСНЫЙ

АНИОКСИД 1000 на сегодняшний день – самое оптимальное сочетание эффективности и переносимости при использовании.

ТОЛЕРАНТНЫЙ

АНИОКСИД 1000 безопасен для ИМН из синтетических материалов и различных металлов (NFS 94 402-1 лабораторные тесты)


НАДЕЖНЫЙ

Эффективность рабочего раствора АНИОКСИД 1000 можно всегда проверить при помощи тест-полосок.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ

Рекомендованное контактное время:

- ДВУ: 5 минут
- Стерилизация: 30 минут.

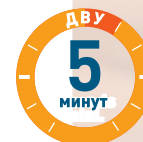

АНИОЗИМ DD1 & АНИОКСИД 1000



Самое идеальное сочетание для обработки эндоскопов, гарантирующее максимальную безопасность для Ваших пациентов, Вас и Вашего оборудования. (стр.06)

АНИОСЕПТ АКТИВ

Активированный раствор надуксусной кислоты для очистки, совмещённой с дезинфекцией, а также для ДВУ и стерилизации.

- Порошок 2 в 1:
очистка совмещенная с дезинфекции + ДВУ/стерилизация
- Спороцидная активность: 15 минут
- Тест полоски для контроля концентрации рабочего раствора
- Альтернатива глутаровому альдегиду
- Не содержит уксусной кислоты

Окончательная промывка ИМН, а также эндоскопов после ДВУ осуществляется фильтрованной водой, полученной с помощью фильтров FILTRANIOS (стр.26).



+ Очистка и дезинфекция кувезов



Контролировать рабочий раствор с помощью индикаторных тест-полосок.



ПРИМЕНЕНИЕ: Очистка, в том числе совмещённая с дезинфекцией, ИМН: инструментов (хирургических, стоматологических, термолабильных...), гибких и жёстких эндоскопов. Ультразвуковая очистка. ДВУ/холодная стерилизация ИМН: инструментов (хирургических, стоматологических, термолабильных...), гибких и жёстких эндоскопов ручным и механизированным способами.

СОСТАВ: Содиум перкарбонат, тетраацетилэтилендиамин, ЧАС, ПАВ, и другие добавки.

АНТИМИКРОБНЫЕ СВОЙСТВА: Средство активно в отношении: БАКТЕРИЙ (в том числе - микобактерий туберкулеза), ВИРУСОВ (в том числе - возбудителей парентеральных гепатитов, ВИЧ, полиомиелита), ГРИБОВ (в том числе - родов Кандида, Трихофитон), СПОР.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Полностью растворить порошок в холодной или теплой воде (+30°C).

- Очистка, совмещённая с дезинфекцией ИМН: 0,5% - 2% (25г - 100г - 5 л воды).
Ополаскивать водой по окончании обработки средством.
- ДВУ/стерилизация:
2% раствор (100г на 5 л): ДВУ - 5 минут, стерилизация - 15 минут
1% раствор (50г на 5 л): ДВУ - 15 минут, стерилизация - 30 минут
0,5% раствор (25г на 5 л): ДВУ - 30 минут, стерилизация - 60 минут

УПАКОВКА:

4 пластмассовые емкости по 1 кг с дозатором
2 пластмассовые емкости по 5 кг с дозатором
50 полуколичественных индикаторных тест-полосок в пластиковом пенале

ЭНДСКОПИЧЕСКИЙ ШКАФ

Мобильный шкаф для хранения чистых эндоскопов.



- Двери-шторки с замком

ОПИСАНИЕ: Мобильный шкаф изготовлен из металла EPOXY Metal и предназначен для хранения 5 или 10 эндоскопов.

- Двери-шторки с замком
- Шасси с защитным противоударным бампером
- Четыре вращающихся колеса диаметром 160 мм со стопором
- 2 хромированные ручки на боковых стенках для передвижения шкафа

ГАБАРИТЫ:

- 5 эндоскопов - В138 x Д80 x Ш45 см
- 10 эндоскопов - В168 x Д80 x Ш45 см

ПОДДОНЫ:

- Полипропилен
- Габариты: 75 x 35 см
- Стерилизация при 134°C

МОДУЛЬ ЭНДСКОПИЧЕСКИЙ

Модуль полуавтоматический для очистки (дезинфекции), ДВУ и стерилизации гибких и жёстких эндоскопов.



КОНВЕЙЕРНАЯ СИСТЕМА

Позволяет обрабатывать несколько эндоскопов одновременно, что увеличивает количество проводимых процедур в день.

ГАБАРИТЫ: Размер модуля, количество моек, направление обработки полностью адаптируемые под размеры Вашего кабинета.



РЕШЕНИЕ АНИОС



ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКАЯ ДВУХПОТОЧНАЯ ПОМПА: Каждый этап имеет индивидуальную помпу для ирригации каналов эндоскопа.

СНИМАЮЩИЕСЯ ТРУБКИ: Легко снимаемые и насаживаемые на помпу трубки, стерилизуемые методом автоклавирования.



ФИЛЬТРАЦИЯ 0,2 µm: Для окончательной промывки эндоскопа используется бактериологически контролируемая вода, получаемая при помощи фильтров ФИЛЬТРАНИОС. Подача воды осуществляется бесконтактно при поднесении руки к сенсору.



СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ: Для централизованного контроля и отслеживания всех систем и этапов обработки.

ПРИНТЕР: По окончании цикла обработки встроенный принтер выдаёт чек.



СИСТЕМА ВЫТЯЖКИ ПАРОВ: Пары стериланта отсасываются и поглощаются активированным углём. Скорость отсоса автоматически увеличивается, при снятии крышки с мойки.



ТЕСТ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ: Эндоскопический модуль снабжён встроенной системой теста на герметичность для выявления возможных повреждений эндоскопа.



СИСТЕМА ДЕЗИНФЕКЦИИ СИФОНОВ: Система очистки и дезинфекции сифонов препятствует любой контаминации.



МАШИННАЯ ОБРАБОТКА ИНСТРУМЕНТОВ И ЭНДСКОПОВ

→ Эффективность и
безопасность Вашего
оборудования

Препараты просты в использовании, адаптированы к
любым типам машин, сохраняют Ваши инструменты и
оборудование

Машинная обработка инструментов

АНИОЗИМ DLM MAXI 	20
АНИОС RHW	20
СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОГО ДОЗИРОВАНИЯ ДЛЯ МОЮЩИХ МАШИН	20

Машинная обработка эндоскопов

АНИОС DL ТРИ ЭНЗИМАТИК	20
------------------------	----

АНИОЗИМ DLM МАКСИ & АНИОС RHW

Идеальная
комбинация!

Детергент +
Ополаскиватель

- Совместимы со всеми автоматами для мойки и дезинфекции, а также туннельными машинами.
- Просты в использовании, не требуется перезагрузки или вмешательства в программу мойки.
- Трёхэнзимная эффективность гарантирована от 30°C.
- АНИОС RHW обеспечивает быструю сушку инструментария.

СИСТЕМА
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО
ДОЗИРОВАНИЯ ДЛЯ
МОЮЩИХ МАШИН



АНИОЗИМ DLM MAXI & АНИОС RHW

Концентрированное трехэнзимное
моющее средство.

- Рекомендовано при наличии органических загрязнений
- Широкая совместимость с материалами
- Щелочной pH
- Применимо для очистки оптики



ПРИМЕНЕНИЕ: Очистка высокого уровня ИМН и медицинского оборудования, лабораторной посуды и другого медицинского и лабораторного инвентаря в автоматических моющих машинах. Совместим с нержавеющей сталью, титаном, синтетикой, полисульфонами, ПВХ-АБС, анодированным алюминием...

СОСТАВ: Ферментный комплекс (липаза, альфа-амилаза, протеаза), неионогенные и ионогенные ПАВ, другие добавки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Используется в концентрациях от 0,1% до 0,5% в теплой (+40°C) или горячей воде в зависимости от типа машины. Оптимальная температура для энзимной активности от +30°C до +70°C.

УПАКОВКА:

2 пластиковые канистры по 5 л
1 пластиковая канистра по 10 л
1 пластиковая канистра по 25 л
1 пластиковая канистра по 200 л

Концентрированный ополаскиватель.

- Ополаскиватель с эффектом смазки
- Быстрая сушка без следов
- Рекомендовано при неосмосной (жёсткой) воде



ПРИМЕНЕНИЕ: Ополаскивание с эффектом смазки ИМН и медицинского оборудования, лабораторной посуды и другого медицинского и лабораторного инвентаря в автоматических моющих машинах. Особенно рекомендовано в машинах, не оснащенных системой получения осмосной воды.

СОСТАВ: Комплекс неионогенных ПАВ, изопропанол, другие добавки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Используется в концентрациях от 0,03% до 0,3%, в зависимости от типа машины.

УПАКОВКА:

2 пластиковые канистры по 5 л
1 пластиковая канистра по 10 л
1 пластиковая канистра по 25 л
1 пластиковая канистра по 200 л

АНИОС DL ТРИ ЭНЗИМАТИК

Концентрированное трехэнзимное
моющее средство.

- Полностью совместим со всеми составляющими эндоскопов и репроцессоров



ПРИМЕНЕНИЕ: ДВУ/холодная стерилизация ИМН: инструментов (хирургических, стоматологических, термолabileных...), гибких и жестких эндоскопов ручным способом и в автоматических машинах.

СОСТАВ: Ферментный комплекс (липаза, альфа-амилаза, протеаза), комплекс неионогенных ПАВ, другие добавки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Рекомендованная концентрация рабочего раствора: 0,2%, автоматическое разбавление репроцессором.

УПАКОВКА:

2 пластиковые канистры по 5 л



ГИГИЕНА РУК И КОЖНЫЕ АНТИСЕПТИКИ



→ Дезинфицируйте
Ваши руки, это
необходимо



Мягкое мыло

САВОН ДУ НФ22

Антисептический гель

МАНУЖЕЛЬ22

Антисептическое мыло

ДЕРМАНИОС СКРАБ НФ23

Защитный крем

КРЕМ ПРОТЕКТРИС23

Кожные антисептики

АНИОСКИН24

АНИОСКИН КОЛОРЛЕСС
(БЕСЦВЕТНЫЙ)24

Оборудование

ДИСПЕНСЕРЫ25

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ВОДЫ26-27

МОЙКИ27-29

САВОН ДУ HF

Мягкое, жидкое мыло для рук и тела.

Рекомендуется для частого мытья, особенно - для чувствительной кожи.



ПРИМЕНЕНИЕ: Для мытья рук и тела в лечебно-профилактических учреждениях, в быту.

СОСТАВ: Замещенный имидазолин с амфотерными свойствами, производные растительных кислот, диэтаноламид линолевой кислоты, увлажняющие и др. добавки.

СВОЙСТВА: Формула с нейтральным pH, обогащенная глицерином, сохраняет влажность эпидермиса при ежедневном частом мытье рук. САВОН ДУ HF также может быть рекомендовано для использования пациентами в качестве геля для душа.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Смочить руки. Набрать в ладонь 2 мл средства. Мылить в течение 30 сек. Тщательно ополоснуть и высушить.

УПАКОВКА:

- 1 12 флаконов по 500 мл с дозирующей помпой
- 2 12 флаконов по 1 л с дозирующей помпой
- 3 12 флаконов эйрлесс по 1 л
- 4 12 флаконов по 1 л для диспенсера
- 5 4 пластиковые канистры по 5 л

МАНУЖЕЛЬ

Гидроалкогольный антисептический гель для гигиенической и хирургической обработки рук.



ПРИМЕНЕНИЕ: Для гигиенической обработки и хирургической дезинфекции рук методом втирания. Используется в лечебно-профилактических учреждениях, в быту.

СОСТАВ: Изопропанол, антисептический агент, ароматизатор, смягчающие, защищающие и увлажняющие кожу добавки.

АНТИМИКРОБНЫЕ СВОЙСТВА: Средство активно в отношении: БАКТЕРИЙ (в том числе - микобактерий туберкулеза), ВИРУСОВ (в том числе - вирусов парентеральных гепатитов, ВИЧ, свиного (A H₁N₁) и птичьего (H₅N₁) гриппа), ГРИБОВ (в том числе - рода Кандида).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Гигиеническая обработка: 3 мл* / 30 секунд. Хирургическая дезинфекция: 2 x 3 мл* / 2 x 1,5 мин. Не смывать.

*1 нажатие на помпу = 1,5 мл

УПАКОВКА:

- 1 20 флаконов по 75 мл
- 2 12 флаконов по 500 мл с дозирующей помпой
- 3 12 флаконов по 1 л с дозирующей помпой
- 4 12 флаконов по 1 л эйрлесс
- 5 12 флаконов по 1 л для диспенсера

Спрашивайте про наши
настенные протоколы



КУКУБОКС ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРЕНИНГОВ



Вид изнутри:

Ультрафиолетовая лампочка выявляет места нанесения гидроалкогольного геля.



Для обучения
правильной
обработке рук

МАНУЖЕЛЬ фосфоресцирующий - для проведения тренировок.



ДЕРМАНИОС СКРАБ HF

Жидкое антисептическое мыло для гигиенического мытья рук. Деликатная формула не вызывает раздражения кожи при частом использовании.

Для частого использования



ПРИМЕНЕНИЕ: Для гигиенической обработки рук в лечебно-профилактических учреждениях.

СОСТАВ: Бигуанид, моющие и увлажняющие компоненты.

АНТИМИКРОБНЫЕ СВОЙСТВА: Средство активно в отношении: БАКТЕРИЙ (в том числе – микобактерий туберкулёза), ВИРУСОВ (в том числе – вирусов парентеральных гепатитов, ВИЧ), ГРИБОВ (в том числе – рода Кандида).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Гигиеническая обработка: 3 мл* / 60 секунд. Тщательно ополоснуть и высушить.
*1 нажатие на помпу = 1,5 мл

УПАКОВКА:

- 1 12 флаконов по 500 мл с дозирующей помпой
- 2 12 флаконов по 1 л с дозирующей помпой
- 3 12 флаконов по 1 л эйрлесс
- 4 4 пластиковые канистры по 5 л



Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по использованию препарата.

КРЕМ ПРОТЕКТРИС

Защитный и восстанавливающий крем для рук.



ПРИМЕНЕНИЕ: Рекомендуется при регулярном воздействии в процессе работы агрессивных моющих средств на кожу рук.

СОСТАВ: Вода, глицерин, цетеариловый спирт, натрий цетеарил сульфат, циклометикон, бутироспермум парки (масло ШИ), стеариновая (октадеконовая) кислота, отдушка и другие добавки.

СВОЙСТВА: Дает защиту в течение 3-4 часов. Выдерживает 5-6 моек. Быстро впитывается кожей, не оставляя жирного налёта.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Использовать 4-5 раз в день. Не смывать.

УПАКОВКА:

- 1 50 флаконов по 50 мл
- 2 50 флаконов по 100 мл
- 3 12 флаконов по 500 мл с дозирующей помпой

АНИОСКИН

Антисептик для обработки операционного поля на основе спирта

НОВИНКА



ПРИМЕНЕНИЕ: Обработка кожи операционного поля, локтевых сгибов доноров, кожи перед введением катетеров и пункцией суставов.

СОСТАВ: Изопропанол, ЧАС, краситель и другие добавки.

АНТИМИКРОБНЫЕ СВОЙСТВА: Средство активно в отношении: БАКТЕРИЙ (в том числе - микобактерий туберкулеза), ВИРУСОВ (в том числе - возбудителей парентеральных гепатитов, ВИЧ, полиомиелита), ГРИБОВ (в том числе - родов Кандида, Трихофитон).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Обработка кожи операционного поля: Кожу двукратно протирают отдельными стерильными марлевыми тампонами, обильно смоченными средством; время выдержки после окончания обработки - 2 минуты; накануне операции больной принимает душ (ванну), меняет белье.

УПАКОВКА:

20 пластиковых флаконов по 500 мл
12 пластиковых флаконов по 1 л

АНИОСКИН КОЛОРЛЕСС (БЕСЦВЕТНЫЙ)

Антисептик для обработки операционного и инъекционного поля на основе спирта

НОВИНКА



Насадка-распылитель

ПРИМЕНЕНИЕ: Обработка кожи операционного поля, локтевых сгибов доноров, кожи перед введением катетеров и пункцией суставов, обработка инъекционного поля.

СОСТАВ: Изопропанол, ЧАС и другие добавки.

АНТИМИКРОБНЫЕ СВОЙСТВА: Средство активно в отношении: БАКТЕРИЙ (в том числе - микобактерий туберкулеза), ВИРУСОВ (в том числе - возбудителей парентеральных гепатитов, ВИЧ, полиомиелита), ГРИБОВ (в том числе - родов Кандида, Трихофитон).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Обработка инъекционного поля: Кожу протирают стерильным ватным тампоном, обильно смоченным средством. Время выдержки после окончания обработки - 15 сек.

Способом орошения: кожу орошают в месте инъекции до полного увлажнения с последующей выдержкой после орошения 15 сек.

Обработка кожи операционного поля: Кожу двукратно протирают отдельными стерильными марлевыми тампонами, обильно смоченными средством; время выдержки после окончания обработки - 2 минуты; накануне операции больной принимает душ (ванну), меняет белье.

УПАКОВКА:

24 пластиковых флаконов по 250 мл с насадкой-распылителем
20 пластиковых флаконов по 500 мл
12 пластиковых флаконов по 1 л

ДЕРЖАТЕЛИ И ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ МЫЛА И КОЖНЫХ АНТИСЕПТИКОВ



Подставка для
сбора капель



ПОД ФЛАКОНЫ С ПОМПОЙ




ПОД ФЛАКОНЫ ЭЙРЛЕСС

- 1 Настенный пластиковый (ПВХ) держатель под флаконы 500 мл
- 2 Настенный пластиковый (ПВХ) держатель под флаконы 1 л
- 3 Настенный пластиковый (ПВХ) держатель с локтевым дозатором под флаконы 500 мл
- 4 Настенный пластиковый (ПВХ) держатель с локтевым дозатором под флаконы 1 л

- 5 Настенный металлический держатель с локтевым дозатором под флаконы 1 л эйрлесс
- 6 Настенный пластиковый (АБС) диспенсер с замком и ручным дозатором
- 7 Настенный пластиковый (АБС) диспенсер с замком и с локтевым дозатором
- 8 Настенный пластиковый (АБС) диспенсер с замком и с сенсорным дозатором

5 МОМЕНТОВ ДЛЯ ГИГИЕНЫ РУК

Когда?	Обработывайте Ваши руки до прямого контакта с пациентом и при подходе к нему.
Почему?	Для защиты пациента от опасных микроорганизмов, переносимых Вашими руками.
Когда?	Обработывайте Ваши руки непосредственно перед выполнением чистой/асептической процедуры.
Почему?	Для защиты пациента от проникновения в его организм болезнетворных микробов, включая его собственных.
Когда?	Обработывайте Ваши руки немедленно после контакта с биологическими выделениями организма пациента (также - после снятия перчаток).
Почему?	Для самозащиты и защиты среды ЛПУ от опасных микробов пациента.
Когда?	Обработывайте Ваши руки после контакта с пациентом и с непосредственно окружающей его средой, а также - при выходе из неё.
Почему?	Для самозащиты и защиты среды ЛПУ от опасных микробов пациента.
Когда?	Обработывайте Ваши руки после контакта с любым объектом или мебелью, находящимися в непосредственном окружении пациента, перед выходом из него - даже если контакт с пациентом не имел места.
Почему?	Для самозащиты и защиты среды ЛПУ от опасных микробов пациента.

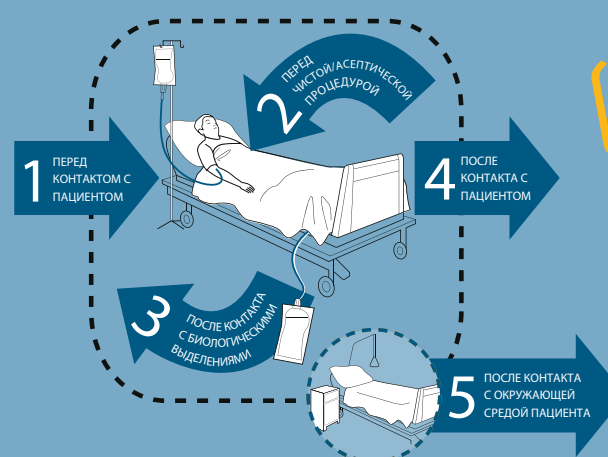

Спрашивайте про наши
мотивационные плакаты



Водопроводная вода, поступающая в лечебные учреждения, содержит ряд патогенов. Это – бактерии, микобактерии, грибы, которые могут стать причиной внутрибольничных инфекций. Особую опасность загрязненная вода представляет для пациентов повышенного риска: с пониженным иммунитетом, с трансплантацией органов, с онкологическими заболеваниями, ВИЧ-инфицированных, с ожогами, новорожденных...

Формирование биоплёнок, содержащих патогены, на внутренних поверхностях труб системы водоснабжения ЛПУ защищает их от воздействия дезинфицирующих средств (хлорирование воды).

Заражение происходит несколькими путями: аэрозольным, воздушно-капельным и контактным (от персонала к пациенту, при контакте с загрязненными поверхностями или загрязнённой водой).

Легионеллёзы – одна из самых актуальных проблем, связанных с контаминацией водопроводной системы ЛПУ. Практически все крупные эпидемиологические вспышки легионеллёза обязаны способности мелкодисперсного аэрозоля, образующегося в местах пользования водой (краны, души...), распространяться в радиусе нескольких километров.

Решением проблемы контаминации воды легионеллами и другими водообитающими патогенами может быть только фильтрация воды в местах пользования (краны, души) при помощи специальных фильтров. Только система фильтрации воды «ФИЛЬТРАНИОС» от Лабораторий АНИОС с её специальной мембраной позволяет получить микробиологически безопасную воду, предупреждая этим распространение ВБИ, связанных с контаминацией воды.

См. санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2.2626 – 10

ИННОВАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Защитный ободок препятствует контаминации фильтра от прикосновения рук
- Отклеиваемая защитная пленка гарантирует стерильность
- Наклейка для ведения журнала и трассируемости
- Стерильный пакет гарантирует стерильность на момент установки на кране
- Шелкографическая печать для идентификации фильтра
- Редукционный клапан для предотвращения брызг и внезапного контакта с кожей

ИМЕЮЩИЕСЯ ВЫХОДЫ



Душевой выход



Струйный выход



Выход 1/2" NPT
с резьбой

Защитный ободок с
отклеиваемой
защитной пленкой на
всех фильтрах



ФИЛЬТРАНИОС SEVEN / 2WA / 30 LP

Фильтры для получения микробиологически чистой воды

- Микробиологически чистая вода в течение 7 дней
- Согласно рекомендациям СанПиН: 3.1.2.2626 – 10

- Микробиологически чистая вода в течение 14 дней
- Двойная мембрана
- Согласно рекомендациям СанПиН: 3.1.2.2626 – 10

Одноразовые
фильтры

- Микробиологически чистая вода в течение 30 дней
- Эффективен против легионеллы*

*СанПиН: 3.1.2.2626 – 10



ПРИМЕНЕНИЕ: Фильтры FILTRANIOS обеспечивают эффективную фильтрацию воды в отношении широкого спектра микроорганизмов (бактерий, включая легионеллы, грибов и др.) в течение **7 дней** (FILTRANIOS Seven A и Seven B) и **14 дней** (FILTRANIOS 2WA), а также защищают от легионеллы в течение **30 дней** (FILTRANIOS 30 LP A и LP B).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Ополаскивание изделий медицинского назначения (включая эндоскопы после ДВУ)
- Гигиеническое мытьё рук медицинского персонала, в том числе – перед хирургической обработкой рук
- Помывка пациентов со сниженным иммунитетом
- Помывка пациентов с ожогами

- Очистка воды для приготовления детского питания
- Бальнеотерапия
- Промывка кувезов после дезинфекции
- Любые другие цели в различных отделениях ЛПУ, когда требуется применение микробиологически чистой воды

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

- Сливные и опорные слои сделаны из полипропилена
- 1 µm префильтрационная мембрана из полипропилена
- Капсула из полипропилена
- Имеющиеся выходы: душевой выход, струйный выход, выход 1/2" NPT с резьбой
- Имеющиеся переходники: CPC и Walther

	ПЕРЕХОДНИКИ	ВЫХОДЫ
FILTRANIOS SEVEN A	Walther Walther CPC CPC	Душевой Струйный Душевой Струйный
FILTRANIOS SEVEN B	Walther Walther Walther	Душевой Струйный 1/2" NPT с резьбой
FILTRANIOS 2 WA	Walther Walther CPC CPC	Душевой Струйный Душевой Струйный
FILTRANIOS 30 LPA	CPC CPC	Душевой 1/2" NPT с резьбой
FILTRANIOS 30 LPB	Walther Walther	Душевой 1/2" NPT с резьбой
FILTRANIOS PS1000	Walther Walther	Душевой Струйный

Оборудование: фильтры для воды / мойки

Диск трассируемости



FILTRANIOS PS 1000

Фильтр для получения микробиологически чистой воды

Автоклавируемый
фильтр

ПРИМЕНЕНИЕ: Стерилизуемый фильтр FILTRANIOS PS 1000 обеспечивает эффективную фильтрацию воды в отношении широкого спектра микроорганизмов (бактерий, включая легионеллы, грибов и др.) в течение **60/90 дней**.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Ополаскивание изделий медицинского назначения (включая эндоскопы после ДВУ)
- Гигиеническое мытьё рук медицинского персонала, в том числе – перед хирургической обработкой рук
- Помывка пациентов со сниженным иммунитетом
- Помывка пациентов с ожогами
- Очистка воды для приготовления детского питания
- Бальнеотерапия
- Промывка кувезов после дезинфекции
- Любые другие цели в различных отделениях ЛПУ, когда требуется применение микробиологически чистой воды

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Капсула из полипропилена содержит:

- Сливные и опорные слои сделаны из полипропилена
- 1 мкм префильтрационную мембрану из полипропилена
- 2x0,2 мкм фильтрационные мембраны и полисульфона
- Фильтрационная поверхность: 100 см² на мембрану
- Диск трассируемости для отметки количества стерилизационных циклов
- Защитный ободок
- Имеющиеся выходы: душевой выход, струйный выход
- Имеющиеся переходники: CPC и Walther

КОЛИЧЕСТВО СТЕРИЛИЗАЦИОННЫХ ЦИКЛОВ:

60 циклов при режиме стерилизации: +134°C / 18 минут
90 циклов при режиме стерилизации: +125°C / 20 минут

• Согласно рекомендациям
СанПиН: 3.1.2.2626 - 10

СИСТЕМА ПРЕФИЛЬТРАЦИИ

ДЛЯ СТЕРИЛИЗУЕМЫХ ФИЛЬТРОВ

ПРИМЕНЕНИЕ: Устанавливается до системы фильтрации, уменьшает засоряющие свойства воды, гарантируя оптимальное использование фильтров FILTRANIOS PS 1000.

СОСТОИТ ИЗ:

- Капсула из полипропилена
- 0,5 мкм префильтрационный картридж
- Редукционный клапан давления с манометром
- Кронштейн из нержавеющей стали

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ПРЕФИЛЬТРАЦИИ:

Наружная часть состоит из полипропиленового моноволокна с уменьшающимся диаметром. Внутренняя часть состоит из двух положительно заряженных слоев стекловолна.



ДЛЯ ОДНОРАЗОВЫХ ФИЛЬТРОВ

ПРИМЕНЕНИЕ: Устанавливается до одноразовой системы фильтрации, удерживает частицы больше 300 мкм, гарантируя оптимальное использование фильтров FILTRANIOS SEVEN A, 2W A и 30 LP.

СОСТОИТ ИЗ:

- Капсула из полипропилена
- 300 мкм префильтрационный картридж
- Редукционный клапан давления с манометром



ПАЛАТНЫЕ УМЫВАЛЬНИКИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Изготовлено из стеклопластика
- Подача воды при помощи инфракрасного сенсора
- Выбор диспансера мыла: 500 мл (электронная), 1 л эйрлесс.
- Прямой кран с аэратором

ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ДВУХ ВЕРСИЯХ:

- Электро-механически контролируемый умывальник (подача воды: электронная, подача мыла: механическая).
- Электронно контролируемый умывальник: воды и мыло

РАЗМЕРЫ:

400 Д x 370 Ш x 500 В (мм)

КОМПАКТНЫЕ МОЙКИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Разработано согласно последним рекомендациям GPEM/SL.

- Изготовлено из стеклопластика
- Подача воды при помощи инфракрасного сенсора или бедренного смесителя
- Насадка для быстрого подсоединения фильтров FILTRANIOS на каждом кране
- Подача мыла при помощи локтевого диспенсера или инфракрасного сенсора.
- Термостатический или механический смеситель
- Префильтрация 0,5 µm

ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ТРЕХ ВЕРСИЯХ:

- Механически контролируемая мойка (вода и мыло).
 - Электро-механически контролируемая мойка (подача воды: электронная, подача мыла: механическая).
 - Электронно контролируемая мойка (вода и мыло).
- Все три версии также поставляются без системы фильтрации FILTRANIOS: прямой кран с аэратором.

КОМПАКТНАЯ, 1 ПОСТ:

1 кран
1 диспенсер для мыла
Размеры: 630 Д x 450 Ш x 520 В (мм)

КОМПАКТНАЯ, 2 ПОСТА:

2 крана
1 диспенсер для мыла
Размеры: 1230 Д x 450 Ш x 520 В (мм)

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЭРГНОМИЧНАЯ МОЙКА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Разработано согласно последним рекомендациям GPEM/SL.

- Изготовлено из стеклопластика
- Подача воды при помощи инфракрасного сенсора (дистанция обнаружения датчика регулируется без нужды демонтажа)
- Насадка для быстрого подсоединения фильтров FILTRANIOS на каждом кране
- Подача мыла/антисептика при помощи инфракрасного сенсора.
- Смеситель
- Перистальтическая помпа с автоклавируемыми трубками

ВЕРСИЯ ПОСТАВКИ:

- Электронно контролируемая мойка на 2 поста
- 2 системы подачи мыла/антисептика
- Размеры: 1620 Д x 700 Ш x 1100 В (мм)
- Опции:
 - Термостатический или механический смеситель
 - Автоматическая система дезинфекции сифонов

Большая глубина мойки
препятствует попаданию
брызг на руки



Все мойки поставляются в трехцветной гамме.



Синий



Слоновой
кости



Серый

ГИПЕРАСЕПТИЧЕСКИЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ МОЙКИ

Все мойки поставляются в трехцветной гамме.



Синий



Слоновой
кости



Серый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Разработано согласно последним рекомендациям GPEM/SL.

- Изготовлено из стеклопластика
- Подача воды при помощи инфракрасного сенсора (дистанция обнаружения датчика регулируется без нужды демонтажа) или бедренного смесителя
- Насадка для быстрого подсоединения фильтров FILTRANIOS на каждом из кранов
- Подача мыла/антисептика при помощи локтевого диспенсера или инфракрасного сенсора
- Смеситель
- Перистальтическая помпа с автоклавируемыми трубками

ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ТРЕХ ВЕРСИЯХ:

- Механически контролируемая мойка (вода и мыло).
- Электро-механически контролируемая мойка (подача воды: электронная, подача мыла: механическая).
- Электронно контролируемая мойка (воды и мыло).

1 ПОСТ:

- 1 кран
- 1 диспенсер для мыла
- Размеры: 960 Д x 580 Ш x 800 В (мм)

2 ПОСТА:


- 2 крана
- Механически контролируемая: 1 или 2 диспенсера для мыла (2 размера).
- Электро-механически контролируемая: 1 или 2 диспенсера для мыла (2 размера).
- Электронно контролируемая: 2 сенсорных диспенсера для мыла.
- Размеры: 1600 Д x 580 Ш x 800 В (мм)
- Короткая версия: 1400 Д x 580 Ш x 800 В (мм)

Бедренный смеситель

Специальные диспенсеры

ОПЦИИ

- Термостатический или механический смеситель
- Для хирургических моек: автоматическая система дезинфекции сифонов
- Специальные диспенсеры

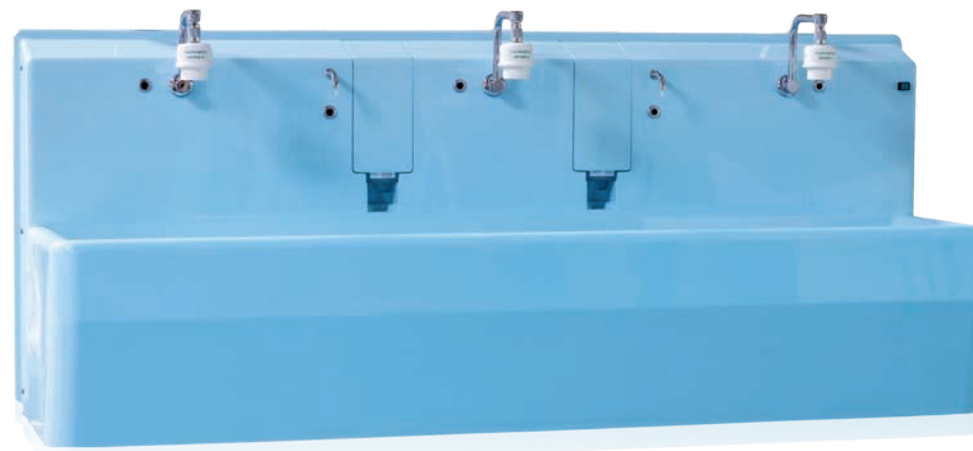

3 ПОСТА:

- 3 крана
- 2 диспенсера для мыла
- Механически, электро-механически и электронно, контролируемые мойки
- Размеры: 2000 Д x 580 Ш x 800 В (мм)



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ

→ Решения для
различных применений



Гамма экологической линии

МЫТЬЕ ПОЛОВ	31
УНИВЕРСАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО	31
ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ	31



Детергент-дезинфектант для посуды

ПРО РСД МАКСИ	32
---------------------	----

Автоматическая мойка подкладных суден

АНИОСИД LB	32
------------------	----



- МЫТЬЕ ПОЛОВ
- УНИВЕРСАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО
- ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ
- СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ТУАЛЕТОВ
- ОБЕЗЖИРИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ КУХНИ
- МЫЛО ДЛЯ РУК



Узнайте все о нашей ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ гамме продукции в специальной брошюре



Мы систематично следуем нашей политике по устойчивому развитию, целью которой является борьба с микробами путем "чистого" химического воздействия.

Придерживаясь своих принципов, Лаборатории АНИОС создали экологически безопасную гамму продуктов, сертифицированную Ecolabel.

МЫТЬЕ ПОЛОВ



ПРИМЕНЕНИЕ: Моющее средство для ежедневной мойки пола и других поверхностей.

СОСТАВ: Декларирован согласно Регламенту (ЕС) n°648/2004: Содержит более 5%, но менее 15% неионогенных и ионогенных ПАВ. Содержит отдушку.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Рекомендованная концентрация рабочего раствора: 1%.

УПАКОВКА:
6 пластиковых флаконов по 1 л с дозатором

УНИВЕРСАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО



ПРИМЕНЕНИЕ: Универсальное чистящее средство, рекомендовано для очистки поверхностей, особенно для кухонь и ванных комнат.

СОСТАВ: ПАВ в спиртовой среде. Декларирован согласно Регламенту (ЕС) n°648/2004: Содержит более 5%, но менее 15% неионогенных и ионогенных ПАВ. Содержит отдушку.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Готовое к применению средство.

УПАКОВКА:
12 флаконов по 750 мл с пенораспылителем

ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ



ПРИМЕНЕНИЕ: Очиститель стекол для регулярной очистки стеклянных поверхностей. Быстросохнущий гидроалкогольный раствор.

СОСТАВ: Декларирован согласно Регламенту (ЕС) n°648/2004: Содержит более 5%, но менее 15% неионогенных и ионогенных ПАВ. Содержит отдушку.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Готовое к применению средство.

УПАКОВКА:
12 флаконов по 750 мл с пенораспылителем



Европейский знак Ecolabel экологически безопасной продукции

ПРО PCD МАКСИ ЗАПАХ ЛИМОНА

Концентрированное средство для мытья и дезинфекции посуды.



НОВИНКА



ПРИМЕНЕНИЕ: Обезжиривание и дезинфекция посуды.

СОСТАВ: Третичный амин, ПАВ и другие добавки.

АНТИМИКРОБНЫЕ СВОЙСТВА: Средство активно в отношении: БАКТЕРИЙ (в том числе - микобактерий туберкулеза, возбудителей особо опасных инфекций), ВИРУСОВ (в том числе - вирусов парентеральных гепатитов, ВИЧ, полиомиелита), ГРИБОВ (в том числе - плесневых, родов Кандида и Дерматофитон).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Средство применяется в концентрациях от 1,5%.

УПАКОВКА:
12 флаконов по 1 л с дозирующей помпой
4 пластиковые канистры по 5 л

АНИОСИД LB

Концентрированное моющее средство для использования в моечно-дезинфицирующих машинах для подкладных суден.

• Термические
моечные машины

НОВИНКА



ПРИМЕНЕНИЕ: Кислотный детергент для термической машинной мойки подкладных суден. Удаляет органические и минеральные отложения.

СОСТАВ: Ортофосфорная кислота, неионогенные и ионогенные ПАВ, гликоли.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Используется в концентрациях от 0,5% до 3%.

УПАКОВКА:
4 пластиковые канистры по 5 л

ПРО PCD МАКСИ ЗАПАХ АБРИКОСА

Концентрированное средство для мытья и дезинфекции посуды.



НОВИНКА



ПРИМЕНЕНИЕ: Обезжиривание и дезинфекция посуды.

СОСТАВ: Третичный амин, ПАВ и другие добавки.

АНТИМИКРОБНЫЕ СВОЙСТВА: Средство активно в отношении: БАКТЕРИЙ (в том числе - микобактерий туберкулеза, возбудителей особо опасных инфекций), ВИРУСОВ (в том числе - вирусов парентеральных гепатитов, ВИЧ, полиомиелита), ГРИБОВ (в том числе - плесневых, родов Кандида и Дерматофитон).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Средство применяется в концентрациях от 1,5%.

УПАКОВКА:
4 пластиковые канистры по 5 л

Для получения более подробной информации о нашей продукции, свяжитесь с нами:

+7 495 988 14 00



**Полностью привержены борьбе против
нозокомиальных инфекций с 1898 года**



123060 - Россия - Москва - ул. Маршала Соколовского - д. 3
Тел. +7 495 988 14 00 - Факс: +7 495 988 14 01

www.anios.ru

Эксклюзивный представитель на территории России: ООО РАМТЭК